



# SANISTERIL NEO FERRI

## SCHEDA TECNICA

### NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO: SANISTERIL NEOFERRI

**CLASSIFICAZIONE:** il Sanisteril Neo Ferri soddisfa le prescrizioni della direttiva sui dispositivi medici (DDM) 93/42/CEE, sulla cui base è identificato come "accessorio" e classificato in "classe IIa".

**FABBRICANTE:** SANITAS SRL, Via Guala, 4 – 15057 Tortona (AL)

Officine di produzione:

Laboratorios Casen-Fleet S.A. Autovia de Logroño km 13.300 Utebo (Zaragoza) - Spagna

Esoform S.p.A., viale del Lavoro 10 - Rovigo

**COMPOSIZIONE:** 100 ml di prodotto contengono: benzalconio cloruro 0,3 g; sodio nitrito 0,3 g; blu patent 0,3 mg; acqua deionizzata q.b.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:** soluzione acquosa allo 0,3% di benzalconio cloruro, limpida, trasparente, colorata in azzurro, pH 6,0 – 7,0.

**CATEGORIA PRODOTTO:** disinfettante – conservante per strumenti chirurgici, dentistici e sanitari.

L'attività battericida del Neo Ferri è stata saggiata e dimostrata secondo le seguenti metodiche analitiche ufficiali:

- PrEn 1040 CEN/TC 216 Sett./96 (attività battericida base)
- CEN/TC 216 WG1 N128 rev. Ago./97 (attività battericida base per strumenti usati in area medica)
- CEN/TC 216 WG 3N54 (test di superficie)

**ISTRUZIONI PER L'USO:** gli strumenti da trattare, previamente lavati e sciacquati, devono essere immersi nel Sanisteril Neo Ferri avendo cura di coprirli completamente e di eliminare eventuali bolle d'aria formatesi. Il Neo Ferri non corrode e non arrugginisce gli strumenti trattati.

**TEMPO DI CONTATTO:** per la disinfezione e conservazione di strumenti, il tempo di immersione è di 5 minuti.

**ISTRUZIONI DOPO L'USO:** rimuovere gli strumenti dalla soluzione usando tecnica sterile e sciacquarli accuratamente con acqua sterile.

**PRECAUZIONI PER L'USO:** il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere gli occhi da accidentali schizzi di prodotto.

**VALIDITA':** se correttamente conservato in confezione integra, ha validità di 36 mesi.

**TIPO DI CONFEZIONI:** Flacone in PEHD da 1000 ml, con sigillo di garanzia  
Tanica in PEHD da 5000 ml, con sigillo di garanzia

**DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL TESTO:** 01.02.2000